

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

营养琼脂培养基

【产品型号与包装规格】

产品编号	产品型号	包装规格
YL024089	NA 平板	90mm×10 个/包
YL0150	NA 斜面	8.5mL×20 支/盒

【产品用途】

用于临床样本中细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。。

【检验原理】

胨和牛肉浸出粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源；氯化钠能维持均衡的渗透压；琼脂是培养基的凝固剂。

【配方成分】

配方（每升）	含量
胨	10.0g
牛肉浸出粉	3.0g
氯化钠	5.0g
琼脂	14.0g
纯化水	1000ml
最终 7.2±0.2	

【使用方法】

营养琼脂培养基 2 种型号产品均为一次性使用产品。从储藏室（2-25℃）取出，并恢复至室温备用。

【质量控制】

1、感官指标

营养琼脂培养基 2 种型号产品均为淡黄色、清晰无沉淀；平板表面平整、无裂痕、无肉眼可见杂质和气泡。

2、理化指标

pH 值：7.2±0.2。

3、生物学指标

下列质控菌株接种待测试培养基，结果如下：

产品编号和型号	指标	质控菌株及编号	培养条件	标准值	特征性反应
YL024089 NA 平板	生长率	大肠埃希氏菌 CMCC(B) 44102	30-35℃, 24h	PR: 0.5 ~ 2.0	灰白色菌落
		金黄色葡萄球菌 CMCC(B) 26003			黄色菌落
		枯草芽孢杆菌 CMCC(B) 63501			灰白色菌落
YL0150 NA 斜面	生长率	大肠埃希氏菌 CMCC(B) 44102	30-35℃, 24h	生长良好	灰白色菌落
		金黄色葡萄球菌 CMCC(B) 26003			黄色菌落
		枯草芽孢杆菌 CMCC(B) 63501			灰白色菌落

4、无菌性指标

YL 024089 和 YL 0150 培养 3 天，无菌落生长。

【储存条件与保质期】

贮存于 2~25℃，避光保存；平板有效期为 6 个月，斜面为 12 个月。

【注意事项】

- 1、营养琼脂培养基 2 种型号均为一次性使用产品，使用人员为微生物检验从业人员，产品多次在低温与常温之间变更会引起琼脂少量的泌水，属于正常现象。使用前应平衡至室温且尽量在无菌干燥箱中预干燥。
- 2、一次性使用产品包装破损或发生渗漏时，有污染风险，请勿使用，按照废物处理方式进行处理。
- 3、本产品对人体无害，若不慎碰到皮肤或掉落至衣服上，请使用清水清洗。
- 4、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【生产信息】

生产企业：广东环凯微生物科技有限公司

生产地址：广州市黄埔区科学城神舟路 788 号

售后服务单位：广东环凯微生物科技有限公司

销售热线：020-32078333 转 8602（分机）

技术热线：020-89856189、89856289

生产备案凭证编号：粤穗药监械生产备 20230082 号

医疗器械备案凭证编号：粤穗械备 20230509

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【产品技术要求】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 11 月 01 日

【参考文献】

- 1、《中华人民共和国药典》2025 年版
- 2、YY/T 0577-2005 营养琼脂培养基